

| | | |
|--|----------------------------|--------------------------|
| NOME DEL PRODOTTO: Medicazioni per vesciche grandi | FORMATO: 6 unità | MARCA: Aquamed |
|--|----------------------------|--------------------------|

DESCRIZIONE

Le medicazioni Aquamed Active Large Blister sono per un immediato sollievo dal dolore e aiutano nella rapida guarigione delle vesciche, riducendo al minimo le cicatrici.

INDICAZIONI

Ottima adesione a lungo termine, facile da applicare, non necessita di riscaldamento anticipato. Protegge da sporco, batteri e acqua. È trasparente e discreto.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia di pulire la zona e asciugare molto bene la zona interessata, l'eventuale umidità residua potrebbe compromettere l'adesione del prodotto. Assicurati che l'area sia priva di creme e oli per migliorare l'adesione. Disinfetti la fiala se è aperta. Rimuovere la medicazione dalla plastica protettiva tenendo la lingua bianca. Posizionare la medicazione sopra il blister, cercando di posizionarla al centro dell'idrocolloide ed evitando il contatto con l'adesivo. Rimuovere la lingua bianca e verificare che i bordi della medicazione siano correttamente attaccati alla pelle. Rimuovere la plastica protettiva trasparente che copre esternamente la medicazione tirando la linguetta verde.

AVVERTENZE

Non rimuovere la benda finché non esce da sola. Non utilizzare se la pelle è arrossata o infetta. Consultare il proprio medico in caso di infezione o irritazione. Se sei diabetico o hai problemi di guarigione, consulta il tuo medico prima di utilizzare il prodotto.

COMPOSIZIONE

Idrocolloide

VALORI NUTRIZIONALI

ALLERGENI

USI
