

<b>NOME DEL PRODOTTO:</b> Tappi per le orecchie in gomma	<b>FORMATO:</b> 6 unità	<b>MARCA:</b> Quies
---	----------------------------	------------------------

## DESCRIZIONE

Le protezioni acustiche in schiuma silenziosa consentono di attenuare i rumori forti in media di 35 dB, senza isolarsi completamente dall'ambiente circostante. La sua forma anatomica si adatta al condotto uditivo, mantenendo una posizione perfetta nell'orecchio.

## INDICAZIONI

La consistenza particolarmente liscia e flessibile della schiuma poliuretana offre un piacevole contatto e non provoca alcun disagio.

È ideale quando concerti, sport meccanici, attrezzature o attrezzature industriali, alcune attività particolarmente rumorose possono indebolire l'udito.

## MODALITÀ D'USO

Si consiglia di rimuovere il cotone, modellare il tappo auricolare arrotolandolo con le dita.

Tenere l'orecchio in alto per facilitare l'inserimento, mentre tenendolo, inserire il tappo auricolare anche quando è compresso.

In pochi secondi si adatterà da solo, modellerà il plug e lo posizionerà con cura all'ingresso del condotto uditivo.

Non tagliare la spina né inserirla in profondità nell'orecchio.

Tirare indietro il padiglione auricolare per espellere l'aria dal condotto uditivo e prevenire il ronzio.

Conservare i tappi nella loro scatola in un luogo pulito e asciutto.

## AVVERTENZE

Dovrebbe essere usato con orecchie pulite e sane.

## COMPOSIZIONE

Schiuma poliuretana.

## VALORI NUTRIZIONALI

---

## ALLERGENI

---

## USI

---